



EndoTherm GmbH


Temperaturen präzise registrieren

- **EndoTherm® Med** für die **Medizin**
Aufzeichnung der menschlichen Kerntemperatur
- **EndoTherm® Basal** für die **natürliche Familienplanung (NFP)**
Bestimmung des Eisprungs
nach der symptomthermalen Methode
- **EndoTherm® Frigo** und **Thermo** für die **Qualitätskontrolle**
Überwachung von Kühlketten, Prozesskontrollen

EndoTherm® Med in der Medizin Aufzeichnung der menschlichen Kerntemperatur



Die Körpertemperatur wird mit einer vaginalen oder rektalen Sonde gemessen. Anschliessend wird dieser Temperaturverlauf auf dem PC angezeigt und kommentiert. Das Diagramm kann dann als Excel-File in der Patientenakte archiviert werden.

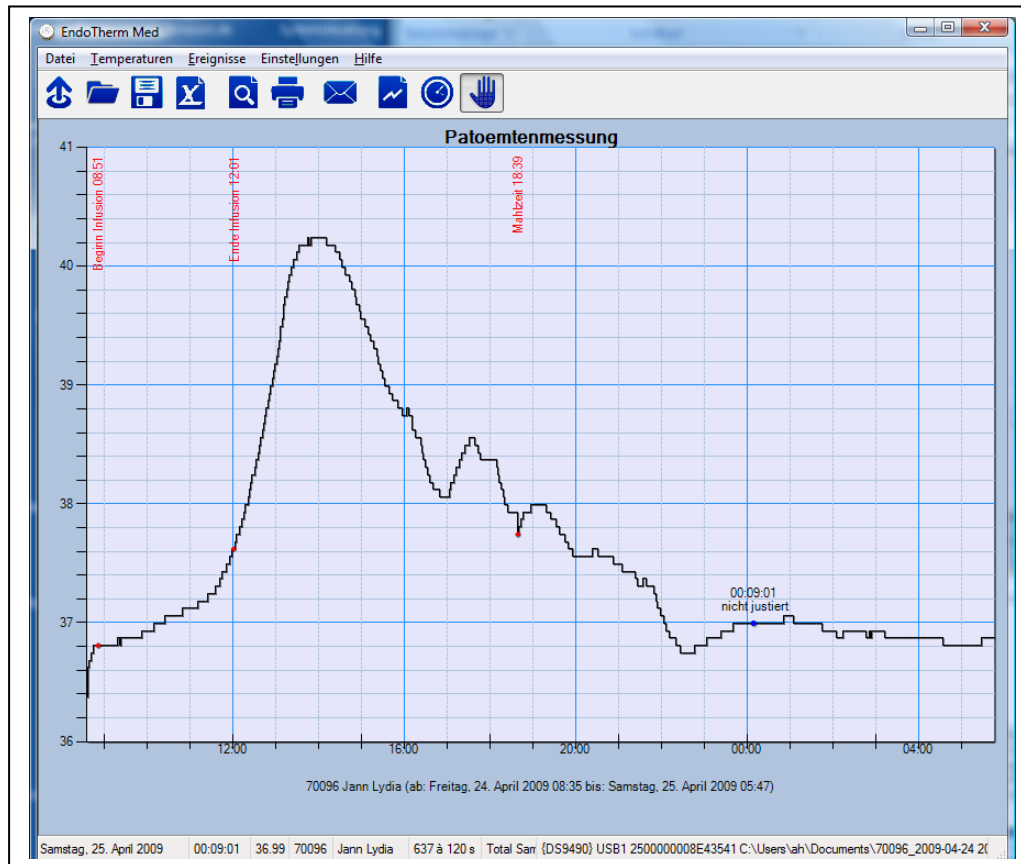

EndoTherm® Med ist erhältlich als Klinikpackung:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 10 autoklavierte Kappen | 90.- SFr |
| 1 kalibrierter Chip | 150.- SFr. |
| 1 Adapter mit Software-Lizenz | 210.- SFr. |

EndoTherm GmbH Tel: +41-61 706 72 51
 Postfach 876 FAX: +41-61-706 72 00
 Kirschweg 9 Email: kontakt@endotherm.ch
 CH-4144 Arlesheim Web: http://www.endotherm.ch
 Geschäftsführer: Dr. Andreas Heertsch

Basellandschaftliche Kantonalbank Kt.Nr.: 16 2.274.066.78
 BIC: BLKBCH22 IBAN: CH32 0076 9016 2274 0667 8
 Postbank Leipzig BLZ 860 100 90 Kt.Nr.: 382231909
 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE038 6010 0900 3822 3190 9
 Handelsregistereintrag: CH-280.4.011.221-6

EndoTherm® Frigo und Thermo für die Qualitätskontrolle

Um Prozesse und Kühlketten zu überwachen, liefern wir zwei Chip-Typen mit folgenden Temperaturbereichen:

Frigo -40°C bis +85°C +/- 0.2°C

Thermo 0°C bis 125°C +/- 0.2°C


Jeder Chip speichert bis zu 4096 Messwerte und wird in einem aufwändigen Kalibrierverfahren über den ganzen Messbereich justiert. Der Justierprozess wird mit einem Werkschein dokumentiert. Das Messintervall ist zwischen 1 sec. und 18 std. einstellbar. Die Speicherung kann durch Über-/Unterschreiten einer Auslösetemperatur gestartet werden. Die Software erlaubt eine Anzeige der kinetischen Temperatur

Kosten:


Chip Frigo 150.- SFr.

Chip Thermo 200.- SFr.

Adapter mit Software 210.- SFr. (Programm wie EndoTherm Med mit zusätzlichen Funktionen)

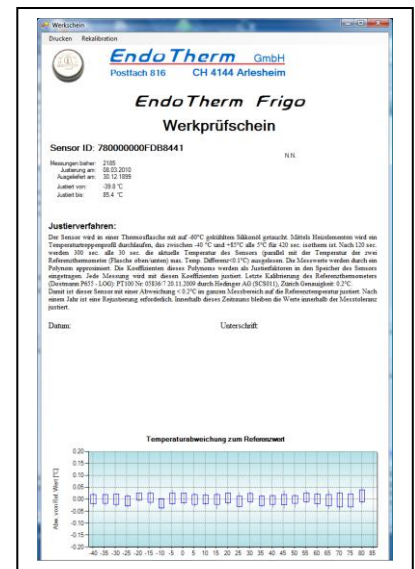

EndoTherm® Basal für die natürliche Familienplanung

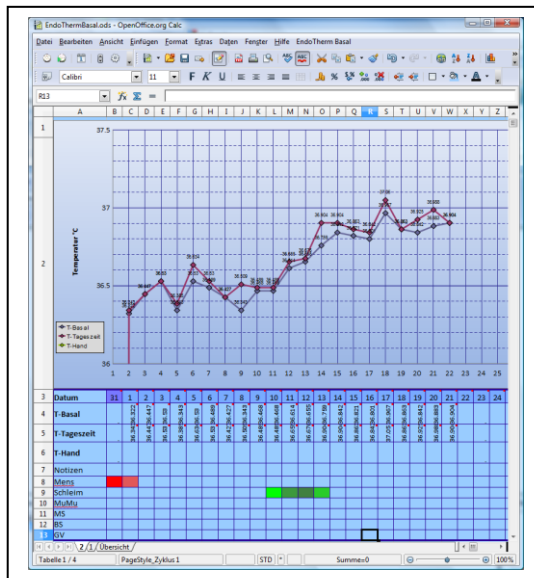

Um seine fruchtbaren Tage zu bestimmen hat sich die Syptothermale Methode bewährt: Jede Nacht Basal-Temperatur bestimmen und Beobachtung der Konsistenz des Cervix-Schleims. Wer dann die Regeln der Symptothermalen Methode einhält, kann seine Empfänglichkeit auf einen engen Zeitraum bestimmen.

In Zusammenarbeit mit Frauen aus dem NFP-Forum wird das Produkt **EndoTherm Basal** entwickelt: Vaginalkappe mit Griff und ein Programm zum einfachen Führen eines Zykluskalenders.

Dabei wurde Wert auf einfache Handhabung (One Click) gelegt und Kompatibilität zu den gängigen Betriebssystemen Windows, Mac OSX und Linux

Die Vaginalsonde wird mit dem gleichen Chip betrieben wie bei EndoTherm Med, sodass der gesamte Erfahrungsschatz übernommen werden konnte. Gleichwohl ist das Produkt bezüglich Software- und Kappen eine Neuentwicklung.

Liefertermin: im Laufe des Jahres 2012. Preis für 1 Set < 100.- €