



Benutzung der Griffkappe

Die Griffkappe nimmt den Temperaturchip (iButton) auf, mit dem die Vaginal-Temperatur registriert wird. (Bedienung: Siehe Gebrauchsanweisung „Erste Schritte“)



Achtung vor erstem Gebrauch reinigen

Kappe vor erstem Gebrauch unbedingt auskochen wie unter *Pflege der Griffkappe* (siehe unten) beschrieben!


Einlegen des Chips

Den Chip mit der geprägten Seite nach unten in die engere Öffnung der Kappe einlegen. Kappe mit ihrem gegenüberliegenden Ende verschliessen. (Siehe blauen Pfeil in nebenstehender Abbildung.)



Herausnehmen des Chips

Die Sonde an beiden Griffenden anfassen und die Kappen auseinanderziehen. (Siehe blaue Pfeile in nebenstehender Abbildung.) Den Chip entnehmen.

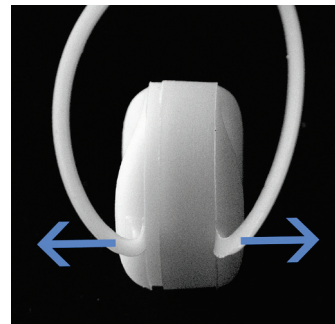

Pflege der Griffkappe

Um beim Gebrauch der Kappe keine Keime einzuschleppen, darf die Kappe nur von *einer* Person verwendet werden und muss regelmässig gereinigt werden.

Kappe nach Gebrauch mit klarem Wasser abspülen und jede Woche auskochen: In einem Topf mit kochendem Wasser 5 min. kochen lassen. Da die Kappe etwas leichter als Wasser ist, kann man die Kappe mit einem Teelöffel oder einer Gabel beschweren. (siehe Abbildung) oder mit einem Schneebesen umrühren.



Nebenwirkungen

- Kappe darf nur immer von derselben Person verwendet werden (Keimverschleppung!).
- Bei entsprechendem Scheiden-Milieu kann eine Geruchsbildung auftreten. Wenn eine Reinigung mit Gebissreiniger-Tabs oder ähnlichem keinen Erfolg bringt: Kappe regelmässig wechseln.

- Wenn die Kappe mit Blut in Berührung kommt, kann sie sich verfärben.
- Nicht in starken Magnetfeldern (z.b. MSR-Tomographie) verwenden.

Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderung
1	06.08.2010	Startversion
2	30.08.2010	Vor erstem Gebrauch <i>auskochen</i> . Als Halter zusätzlich <i>Gabel</i>
3	23.05.2011	Nebenwirkungen hinzugefügt

Nur Seite 1 ausdrucken

Freigegeben: